

SimplyMED⁺

Dětská nosní odsávačka
a vakuový čistič pórů

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod
a po použití jej dobře uschovejte.



Model: JY-922

ÚVOD

Zakoupený výrobek je dětská elektrická vodotěsná nosní odsávačka, která se používá k odsávání nosních sekrecí dítěte. Výrobek je vybaven 3 hlavicemi – jsou to tykвовitá (plochá) špička a trychtýřovitá (plochá, lichoběžníková) špička pro různé věkové kategorie. Špička je ze silikonového materiálu, má měkkou texturu, je nedráždivá, bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Různé tvary špiček usnadňují absorpci sekrecí z různých částí nosní dutiny.

VLASTNOSTI

Volitelný tvar špičky

Vyberte si správnou silikonovou koncovku (špičku) podle potřeby a věku vašeho dítěte.

Přepínání mezi dvěma režimy

Pokud výrobek používáte jako dětskou nosní odsávačku, vyberte režim “NOSE” s 1 úrovní. Pokud výrobek používáte pro odstraňování černých teček na obličeji, vyberte režim “FACE” se 6 úrovněmi. Režim “FACE” můžete také zvolit jako dětskou nosní odsávačku, a to v případě, že si myslíte, že sání je pro režim “NOSE” nízké. Zapněte přístroj úroveň 1 v režimu „NOSE“, po dalších 20 minutách se toto zařízení automaticky vypne.

Snadné čištění

Výrobek lze opláchnout vodou (ale nesmí být ponořen do vody). Sací hlavu a sběrnou nádržku lze vyjmout a čistit samostatně, přístroj tak vyčistíte důkladněji.

Velká kapacita, dobijecí

Vestavěná 850 mAh velkokapacitní dobíjecí lithiová baterie, doplněná přenosným nabíjecím konektorem USB, může být nabíjena počítačem, powerbankou a dalšími zařízeními s rozhraním USB, snadno se přenáší.


SPECIFIKACE

Jméno výrobku	Dětská nosní odsávačka Vakuový čistič pórů
Model	JY-922
Dobíjecí napětí	5V/1A
Napětí baterie	3.7V
Jmenovitý výkon	3W
Kapacita baterie	850 mAh

ROZMÍSTĚNÍ TLAČÍTEK

A INSTRUKCE

- 1 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje
- 2 Tlačítko pro přepínání režimů
- 3 Tlačítko pro nastavení úrovní
- 4 Režim „NOSE“ – nos
- 5 Režim „FACE“ – obličej
- 6 Stav nabití baterie
- 7 Úroveň

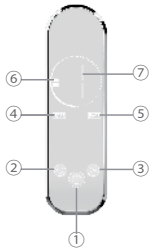

POKYNY PRO VYUŽITÍ

KONCOVEK

Malý hrot ve tvaru nálevky (lichoběžníkový)

Novorozencům jsou k dispozici špičky ve tvaru nálevky, které mohou být umístěny hlouběji do nosní dutiny, vhodné odstranění sekretu z hlubších částí nosní dutiny.



Špička ve tvaru tykve (plochá)

Pro malá miminka (děti ve věku 3–6 měsíců) je k dispozici menší špička, která je snadno vložitelná do nosní dírký a která snadno absorbuje nosní sputum.




Špička ve tvaru nálevky (plochá)


Vhodná pro děti od jednoho roku a starší. Špičky ve tvaru nálevky dosáhnou hlouběji do nosní dutiny a jsou vhodnější pro odstranění hlubšího nosního výtoku.




JAK PŘÍSTROJ SESTAVIT

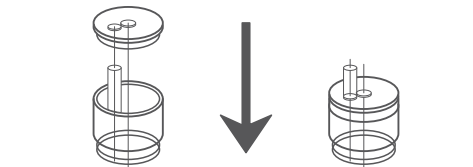

- 1. Nasadíte kryt proti zpětnému toku na sběrnou nádržku.

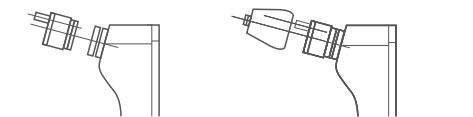

- 2. Namontujete sestavenou sběrnou nádržku do drážky pracovního prostoru.
- 3. Umístíte velkou černou sací hlavu na sestavený sběrný prostor.

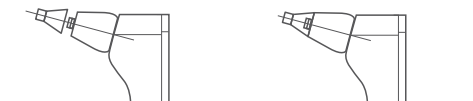

- 4. Nainstalujete silikonovou trysku na velkou černou PP hlavu.
- 5. Zkompletování přístroje.

TIPY: Nainstalujte nosní odsávací zařízení, věnujte pozornost instalaci komponentů. Během instalace utahujte komponenty ve směru hodinových ručiček, abyste zajistili, že se díly neuvolní.

POUŽITÍ

- 1. Nejprve sestavte pracovní část nosního odsávacího zařízení (zkontrolujte, zda je dobře upevněn těsnicí gumový kroužek základny nosní čisticí kazety) a poté nainstalujte příslušnou silikonovou sací hlavu. Poté vyberte vhodnou polohu úrovně.
- 2. Při prvním použití přístroj nabíjejte po dobu 3 hodin, abyste prodloužili životnost baterie.
- 3. Před použitím elektrické nosní odsávačky pro dítě použijte hřbet ruky k otestování sací síly a nastavte ji do vhodné polohy před tím, než ji dítěti přiložíte.

Specifické operace:

- 1. Pokud jsou nosní dírký vašeho dítěte suché, musíte nejprve použít běžný fyziologický roztok ke změkčení nosní dutiny a teprve poté použít elektrickou nosní odsávačku.
- 2. Pokud jsou nosní dírký vašeho dítěte úzké, můžete použít elektrickou nosní odsávačku přímo.
- 3. Pokud, i bez sledování nosu dítěte, znatelně slyšíte zvuk “chrápání”, nos je ucpaný, doporučujeme jemně stimulovat nosní dírký dítěte, nechat dítě kýchnout ven a pak použít elektrické odsávací zařízení k vysátí.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A PÉČE

- 1. Před použitím se ujistěte, že součásti pracovního prostoru jsou dobře vyčištěny a nezůstala zde žádná kapalina. Ovlivňuje negativně odsávání. Vyčištěním navíc bráníte růstu bakterií.
- 2. Nedovolte, aby dítě používalo výrobek samo. Před použitím otestujte sání na hřbetu ruky dospělého.

- 3. Při čištění a údržbě, prosím, vždy vypněte přístroj. Neponořujte tělo přístroje do vody. Špička a sběrná nádržka mohou být vyjmuty a čištěny samostatně. Umyjte pracovní prostor a hlavici. Použijte bavlněný tampon, abyste pomocí malého množství lékařského alkoholu vyčistili přívod vzduchu. Po vyčištění se ujistěte, že jsou díly zcela suché a poté správně nasazený.
- 4. K nabíjení použijte odpovídající kabel USB, abyste zajistili, že nabíjecí napětí splňuje požadavky produktu.
- 5. Během používání přístroj nenabíjejte.
- 6. Pokud se nepoužívá po dlouhou dobu (asi tři měsíce), přístroj důkladně vyčistěte a vhodně uložte.
- 7. Tento výrobek nerozebírejte ani neopravujte sami. V případě oprav se obraťte na obchod, kde jste produkt zakoupili.

Výrobce:
Wenzhou Kaiyan Electric Co., Ltd. No. 7, Juxin Road, Juguangyuan, South Suburb Street, Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang Province, Čína

Dovozce:
Variopharma, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Datum poslední revize: 07/2022
Autorizovaný servis:
Milan Řihák, Sibiřská 89, 62100 Brno
Tel. +420 731 155 864, e-mail: Milan.rihak@seznam.cz
Pondělí až pátek 9–17 h.

